


## Slušni aparati za nošenje iza ušiju

### Uputstvo za upotrebu

Ovo priloženo Uputstvo za upotrebu opisuje brzo i komotno posluživanje Vašeg slušnog aparata. Ovde ćete naći sve važne informacije u vezi sa rukovanjem Vašeg slušnog aparata kao i o rukovanju baterijama.

Dodatne preporuke naćete u Savetima za upotrebu aparata (koji se ne prilažu svakom slušnom aparatu).  
Ili – jednostavno se obratite Vašem stručnjaku-akustičaru za slušne aparate.

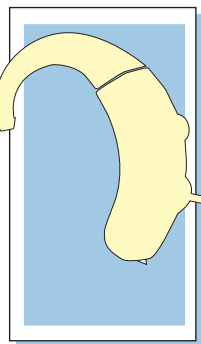

SR

1

## Sigurnosna uputstva za baterije

### UPOZORENJE.

Progutati baterije je škodljivo po zdravlje. Stoga ih držati nedostupno za decu.

### PAŽNJA.

Izvadite baterije ukoliko duže vremena ne koristite slušni aparat. Odmah zameniti baterije koje počnu da propuštaju.


### PREPORUKA.

Istrošene baterije ne bacajte u smeće!  
Vratite ih stručnjaku-akustičaru za slušne aparate.

2


## Ulaganje ili zamenjivanje baterija

Tip baterije  
Originalna veličina

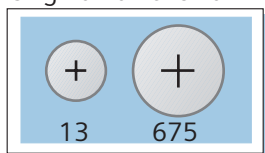

### UPOZORENJE.

Kod određenih aparata posle nekog vremena možete da čujete zvuke koji postaju tiši ili dodatne zvuke. To znači: Napon baterije popušta. U takvom slučaju zamenite bateriju.

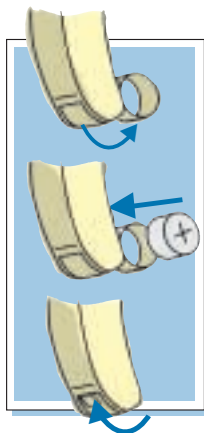

Otvorite pretnac za bateriju

Uložite bateriju

Zatvorite pretnac za bateriju

SR

3


## Uključivanje/ isključiv.

ILI OVAKO


ILI OVAKO

ILI OVAKO


Uključivanje  
Slušni kalem  
Isključivanje

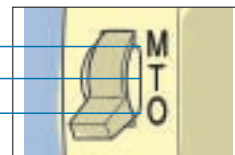


Kod nekih slušnih aparata prekidač stoji popreko

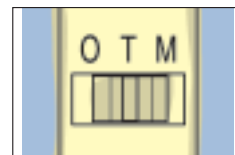

Uključiti tj.  
1. slušni program  
2. slušni program  
Isključiti

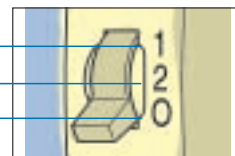


4

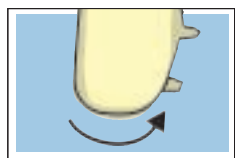

### UKLJUČIVANJE:

Zatvorite pretnac za bateriju

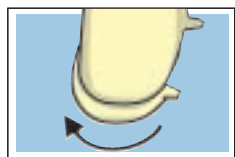

### ISKLUČIVANJE:

Pretinac za bateriju otvorite do mesta uskakanja.

SR

5


## Podešavanje glasnoće

ILI OVAKO

ILI OVAKO



glasnije  
obrtati  
tiše

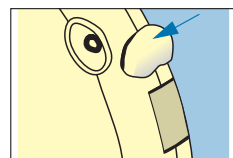

glasnije:  
pritisnite nagore  
tiše:  
pritisnite nadole

6

### PAŽNJA

Slušni aparati sa snažnim pojačavanjem zvuka mogu da prouzrokuju trajno oštećenje sluha, ako se njima pogrešno rukuje.

Molimo Vas da se raspitate kod Vašeg stručnjaka-akustičara za slušne aparate.

### UPOZORENJE

Kod aparata bez regulatora glasnoće, glasnoća se automatski namešta.

SR


7

## Biranje slušnog programa

NE KOD SVIH APARATA


ILI OVAKO

Preklapanje:  
Pritisnite  
na tipku

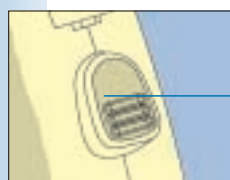

ILI OVAKO


Pritisnite  
na tipku

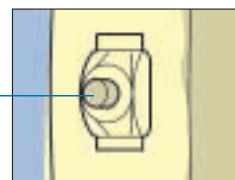

8


## Biranje slušnog programa

NE KOD SVIH APARATA

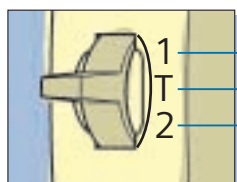

ILI OVAKO

- 1. slušni program
- T slušni kalem
- 2. slušni program

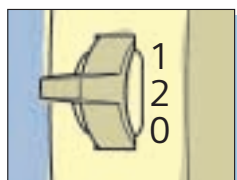

ILI OVAKO

Preklopite prekidač

SR

9

## Osiguranje baterije od dece


NE KOD SVIH APARATA

Za blokiranje upotrebite kakav oštar predmet.

deblokirati




blokirati

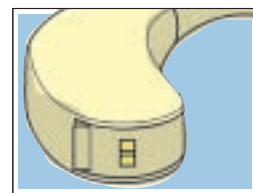

10

## Osiguranje baterije od dece

NE KOD SVIH APARATA

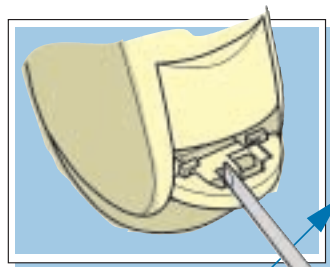

Za blokiranje upotrebite kakav oštar predmet.

Pretinac za bateriju otvorite do mesta uskakanja.

blokirati

deblokirati

SR

11

## Audio ulaz za priključivanje eksternih aparata

Kod specijalnih slušnih aparata moguće je priključivanje dodatnog pribora preko audio papučice. Molimo Vas da se raspitate kod Vašeg stručnjaka-akustičara za slušne aparate.

UPOZORENJE

Opasnost od električnog udara!

Audio ulaz povezati sa aparatima koji su priključeni na električnu mrežu samo ako isti najmanje ispunjavaju sigurnosne odredbe shodno normi IEC 65/BS EN 60065.

12



NE KOD SVIH APARATA

Audio papučica

SR

13

## Opšta sigurnosna uputstva

PAŽNJA.

Zaštititi od vlage, mokrine, toplote i mehaničkih dejstava.

PAŽNJA.

Izvaditi slušni aparat pre nego što nastupe sledeći slučajevi:

- pre tuširanja / kupanja, pre upotrebe laka za kosu
- npr. u lekarskim ordinacijama ili bolnicama: kod snažnih magnetskih ili visokofrekventnih polja
- pre direktnog izlaganja rentgenskim zracima

UPOZORENJE. Slušne aparate ne upotrebljavajte u prostorijama, u kojima postoji opasnost od eksplozije!

14

## Šta raditi u slučaju smetnje

- Da li je aparat uključen?
- Da li je baterija uložena?
- Da li je baterija prazna?
- Da li je pretinac za bateriju zatvoren?
- Da li je regulator glasnoće otvoren?
- Da li je otvor zvučnika ušnog dela aparata zaprljan ušnom mašću?

UPUTSTVO ZA NEGU

Ušne delove aparata redovno očistiti od ušne masti. Sredstvo za čišćenje možete dobiti kod Vašeg stručnjaka-akustičara.

SR

15

Sa oznakom CE, Siemens potvrđuje pridržavanje Evropske smernice za medicinske proizvode 93/42 EWG.

CE  
0123

Siemens  
Audiologische Technik GmbH  
Gebbertstraße 125  
D-91058 Erlangen

A91100-M5100-B666-01-76V5  
78 12 519 · JK

www.hoergeraete-siemens.de  
www.hearing-siemens.com

16