


Slušni aparati za nošenje u ušima

Uputstvo za upotrebu

Ovo priloženo Uputstvo za upotrebu opisuje brzo i komotno posluživanje Vašeg slušnog aparata. Ovde ćete naći sve važne informacije u vezi sa rukovanjem Vašeg slušnog aparata kao i o rukovanju baterijama.

Dodatne preporuke naćete u Savetima za upotrebu aparata (koji se ne prilažu svakom slušnom aparatu).
Ili – jednostavno se obratite Vašem stručnjaku-akustičaru za slušne aparate.

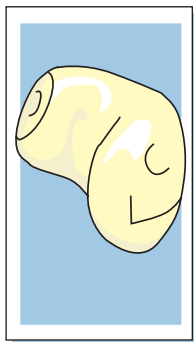

SR

1

Sigurnosna uputstva za baterije

UPOZORENJE.

Progutati baterije je škodljivo po zdravlje. Stoga ih držati nedostupno za decu.

PAŽNJA.

Izvadite baterije ukoliko duže vremena ne koristite slušni aparat. Odmah zameniti baterije koje počnu da propuštaju.


PREPORUKA.

Istrošene baterije ne bacajte u smeće!
Vratite ih stručnjaku-akustičaru za slušne aparate.

2


Ulaganje ili zamenjivanje baterija

Tip baterije
Originalna veličina

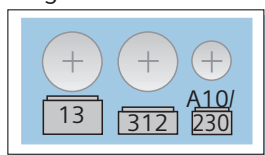

UPOZORENJE.

Kod određenih aparata posle nekog vremena možete da čujete zvuke koji postaju tiši ili dodatne zvuke. To znači: Napon baterije popušta. U takvom slučaju zamenite bateriju.

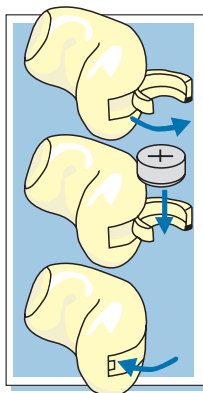

Otvorite pretinac za bateriju

Uložite bateriju

Zatvorite pretinac za bateriju

SR

3


Podešavanje glasnoće

APARATI SA REGULATOROM GLASNOĆE.
GLASNIJE: Točkić vrteti prema napred.
TIŠE: Točkić vrteti unazad.

APARATI BEZ REGULATORA GLASNOĆE.
Zatvorite pretinac za bateriju.
Glasnoća se automatski namešta.


PAŽNJA

Slušni aparati sa snažnim pojačavanjem zvuka mogu da prouzrokuju trajno oštećenje sluha, ako se njima pogrešno rukuje. Molimo Vas da se raspitate kod Vašeg stručnjaka-akustičara za slušne aparate.

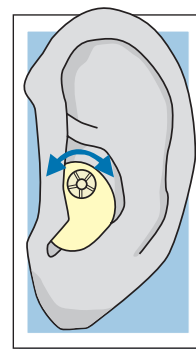

4

Isključivanje aparata

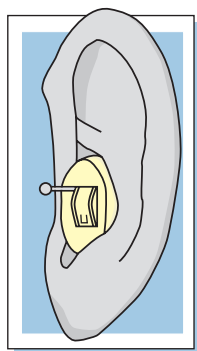

ISKLUČIVANJE:
Otvorite pretinac za bateriju


SR

5

Biranje slušnog programa

NE KOD SVIH APARATA


Preklapanje:
Pritisnite na tipku

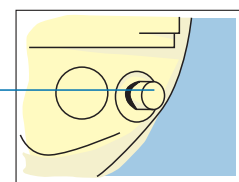

6

Biranje slušnog kalema

NE KOD SVIH APARATA

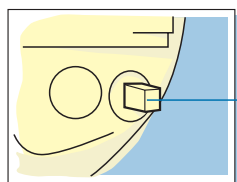


Uključivanje:
Preklopite pregibni prekidač

SR


7

Vađenje aparata iz ušiju

Otvorite pretinac za bateriju, aparat pažljivo izvucite držeći ga za pretinac za bateriju

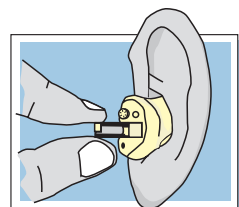


IZNIMKA:
MINIJATURNI APARATI
Lako potegnite za ušnu školjku, aparat izvucite držeći ga za najlonski konac

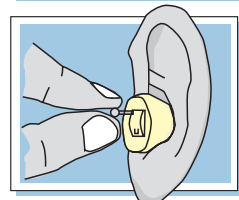

8

Aparati sa CERUMENSKOM zaštitnom kapom

PAŽNJA. Zaštitnu kapu nikada mehanički ne čistiti (osetljiva membrana).

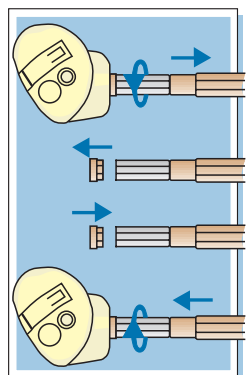

Zamenjivanje:

Staru kapu odšarafite

Odstranite

Novu kapu natakните


Zašarafite

SR

9

Aparati sa cerumenskim koritom

Ušnu mast svakodnevno odstranite pomoću petlje ili četkice

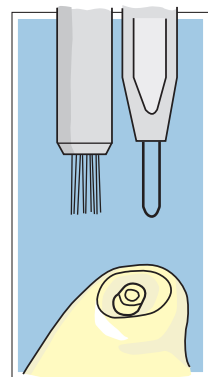

PREPORUKA.

Ukoliko posedujete kakvu drugačiju cerumensku zaštitu za Vaš aparat, molimo Vas neka Vam Vaš stručnjak-akustičar za slušne aparate objasni upotrebu aparata.

10

Opšta sigurnosna uputstva

PAŽNJA. Zaštititi od vlage, mokrine, toplote i mehaničkih dejstava.

PAŽNJA. Izvaditi slušni aparat pre nego što nastupe sledeći slučajevi:

- pre tuširanja / kupanja, pre upotrebe laka za kosu
- npr. u lekarskim ordinacijama ili bolnicama: kod snažnih magnetskih ili visokofrekventnih polja
- pre direktnog izlaganja rentgenskim zracima

UPOZORENJE.

Slušne aparate ne upotrebljavajte u prostorijama, u kojima postoji opasnost od eksplozije!

SR

11

Šta raditi u slučaju smetnje

- Da li je baterija uložena?
- Da li je aparat uključen odn. da li je pretinac za bateriju zatvoren?
- Da li je baterija prazna?
- Da li je regulator glasnoće otvoren?
- Da li je aparat zaprljan ušnom mašću?

12

Preporuka

Molimo Vas da pribor za negu izaberete potpuno u skladu sa Vašim potrebama.

Vaš stručnjak-akustičar za slušne aparate rado će Vas posavetovati prilikom izbora i pomoći Vam kod rukovanja aparatom.

SR

13

Sa oznakom CE, Siemens potvrđuje pridržavanje Evropske smernice za medicinske proizvode 93/42 EWG.

14

CE
0123

Siemens
Audiologische Technik GmbH
Gebbertstraße 125
D-91058 Erlangen

A91100-M5100-B667-01-76V5
78 18 391 · CG

www.hoergeraete-siemens.de
www.hearing-siemens.com

CE
0123

15